



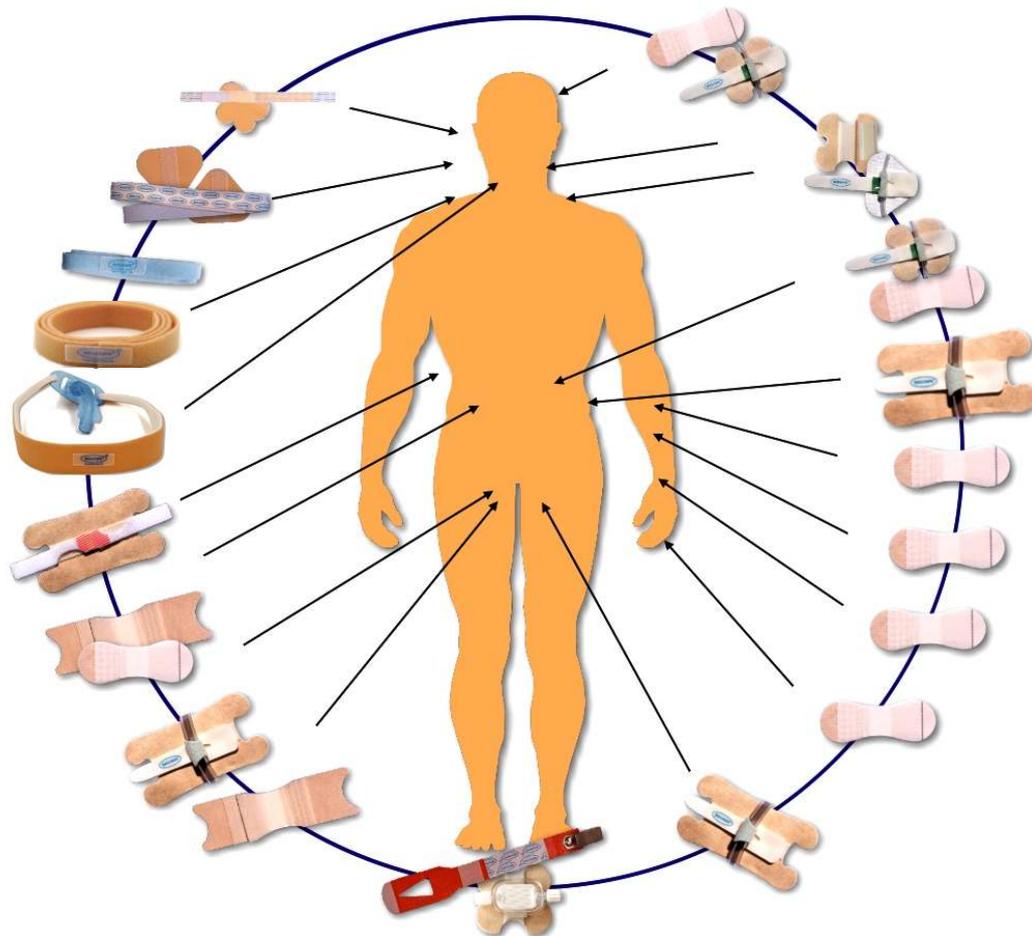

FIXIERSYSTEM

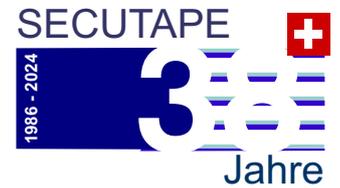

KATALOG

Wir bieten kostenlose Produktschulungen!



TechniMed AG

SWITZERLAND since 1987
fon 0041 / 71 844 49 20

Kirchstrasse 54
CH-9400 Rorschach

fon 0800 007 9892
fax 0041 / 71 845 52 45

Germany

fon 0800 007 9892
fax 0800 941 3012

Austria

fon 01/ 440 7979
fax 01/ 440 7990



Made in Germany
www.secutape.ch

Copyright by TechniMed AG

mail: info@technimed.ch


Das SECUTAPE Prinzip

Das Basispflaster klebt komplett auf der Haut, es gibt keine angelöste Stelle !

Der "Schlauch" wird in Klebstoff gebettet, ein Klettverschluss verhindert das Öffnen der Lasche!

Über diese Lasche werden die Bewegungen des Schlauchs auf das gesamte Pflaster übertragen. Die Fixierung hält und kann durch den Klettverschluss geöffnet und wieder verschlossen werden!

Alle SECUTAPE Fixierungen funktionieren nach dem gleichen Prinzip.

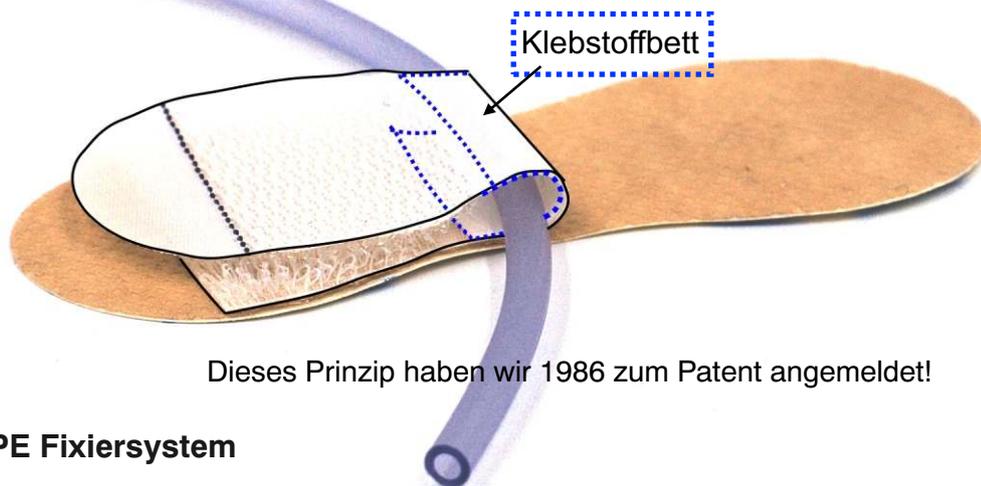

Dieses Prinzip haben wir 1986 zum Patent angemeldet!

Das SECUTAPE Fixiersystem

bietet sichere und zuverlässige Lösungen für praktisch alle zu befestigenden Katheter, Drainagen, Sonden, Tuben und Leitungen, also für alle schlauchförmigen Hilfsmittel.

Wir sind Spezialisten auf diesem Gebiet. Seit über dreissig Jahren entwickeln, fertigen und vertreiben wir zig-millionenfach ausschliesslich Fixierungen und halten eine ganze Anzahl Patente.

Wir bieten unseren Kunden:

kostenlose Schulungen und Beratung über unseren Aussendienst incl. umfangreicher Unterlagen.

Unsere **INFOCARE e-learning Plattform** zur Schulung von neuen Mitarbeitern und zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse.

Unsere Fixierungen sind High-Tech Produkte in Deutschland und der Schweiz gefertigt.

Die eingesetzten Materialien werden speziell für uns hergestellt und kommen aus der Schweiz, Deutschland, den USA und Italien.

Sie sind hypoallergen, med. unbedenklich und enthalten keinerlei Lösungsmittel.


Nur durch den Einsatz hochwertiger Materialien in Verbindung mit unseren speziellen und ergonomischen Formen erreichen wir die erstaunliche Haltekraft unserer Fixierungen.

Unsere Fixierungen halten besser und länger, sie verursachen in aller Regel keine Hautschäden und müssen weniger häufig gewechselt werden als Andere.

Über den Einsatzzeitraum gerechnet sind sie somit auch kostengünstig.

In die EU liefern wir ab Lager Deutschland!

Unsere Produkte tragen einen QR-Code und sind mit GTIN-Barcodes ausgestattet.

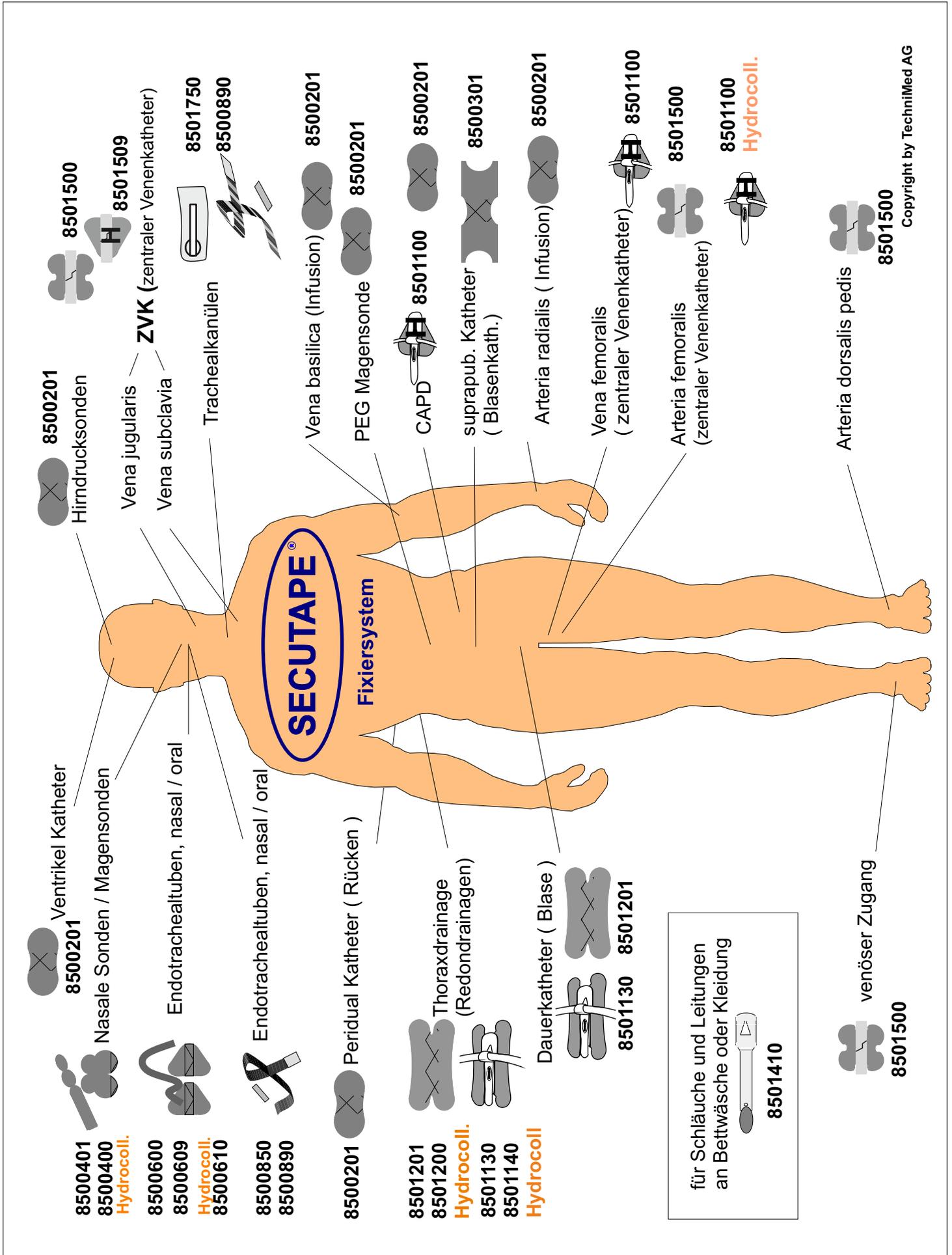

SECUTAPE® Fixierungen können in der Regel einige Tage am Patienten verbleiben und bieten die unter den Gegebenheiten bestmögliche Fixierung !!



Originalgrösse





Grösse 2 / 2+ / 3+ Standardfixierung



Anwenden

Die original SECUTAPE Standardfixierungen!

Seit über 35 Jahren millionenfach bewährt.

Die gut haltenden Fixierungen mit ergonomischer Form sind aus einem atmenden, hochwertigen und besonders hautverträglichen Vlies bzw. Tape.


Einfach in der Anwendung können sie **mehrmals geöffnet** und wieder verschlossen werden. Sie halten auch wenn sie nass werden, z.B. wenn der Patient gewaschen wird oder duscht.

Speziell zur Fixierung von:

PEG, CAPD, ZVK, NFC, Suprapubische Katheter, Infusionen, Urin-Katheter, Redondrainagen, Ports, Wunddrainagen, Sonden zur Druckmessung und allen anderen "Schläuchen"

Hinweis:

Art. Nr. 8500200 klebt besser auf Verbänden,
Art. Nr. 8500201 hält besser auf der Haut!

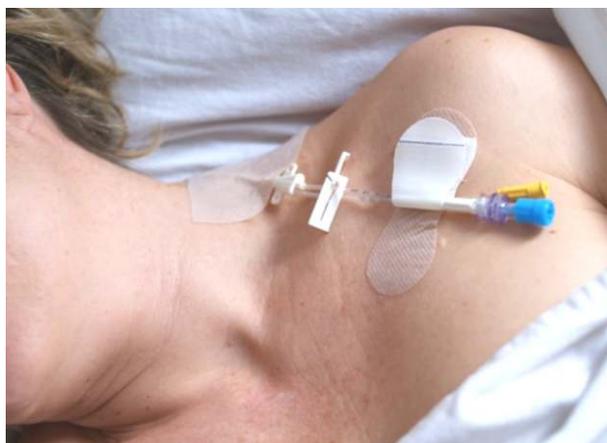

 **2**

Art. Nr. 8500200	1 VE 200 Stk.
Folie Transpore [®]	
Einzelverp.	8 Btl. à 25 Stk.
Art. Nr. 8500210	1 VE 1000 Stk.
	20 Btl. à 50 Stk.

 9 x 3.5 cm

 **2+**

Art. Nr. 8500201	1 VE 200 Stk.
Vliesbasis	
Einzelverp.	8 Btl. à 25 Stk.
Art. Nr. 8500211	1 VE 1000 Stk.
	20 Btl. à 50 Stk.

 9 x 3.5 cm

 **3+**

Art. Nr. 8500301	1 VE 200 Stk.
Vliesbasis	
Einzelverp.	8 Btl. à 25 Stk.
Art. Nr. 8500311	1 VE 1000 Stk.
	20 Btl. à 50 Stk.

 15 x 4.5 cm

Liegedauer nach Anwendung:
ca. 3 - 5 Tage



Made in Germany
www.secutable.ch



Originalgrösse





Fixiersystem Klettbinder

Die neue Idee für Fixierungen!



Anwenden

Ein universelles System für alle Anwendungsbereiche und alle Durchmesser!

Fixieren ohne Klebstoff an Schlauch oder Leitung!
Zuverlässig gehalten durch **NANOPLAST®**
eine neu entwickelte Antirutschfolie mit sog. Gecko Effekt.

Die Fixierung kann beliebig oft geöffnet werden.
Es bleiben keine Rückstände am Schlauch
die Fixierung hält immer wieder!

Den Klettbinder gibt es als Set mit 2 verschiedenen Haltern auch in Hydrocolloid für jeden Anwendungsbereich.

Durch die ergonomischen Formen und das hochwertige, atmende und hautschonende Material halten die Fixierungen auch bei häufigem Zug, selbst wenn sie nass werden!


Für implantierte Zu- und Abgänge ist der Klettbinder besonders gut geeignet!

Die **NANOPLAST** Folie ist aus Silicon mit ca. 29000 Haftelementen per qcm.



	Klettbinder Art. Nr. 8501000 VE 200 St. Einzelverp. 8 Btl. a 25 St. 13.5 x 2.5 cm
	Klettbinder - Set KLEIN Hydrocolloid Art. Nr. 8501100 VE 100 St. Einzelverp. 4 Btl. a 25 St. Halter 6.5 x 5 cm
	Klettbinder - Set GROSS Art. Nr. 8501130 VE 100 St. Einzelverp. 4 Btl. a 25 St. Halter 12 x 6.5 cm


Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3Tage
Hydrocolloid - 6 Tage

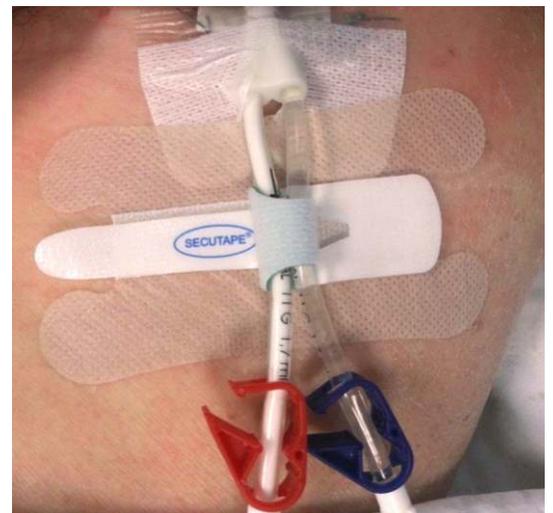

CE
Made in Germany
www.secutape.ch



Originalgrösse

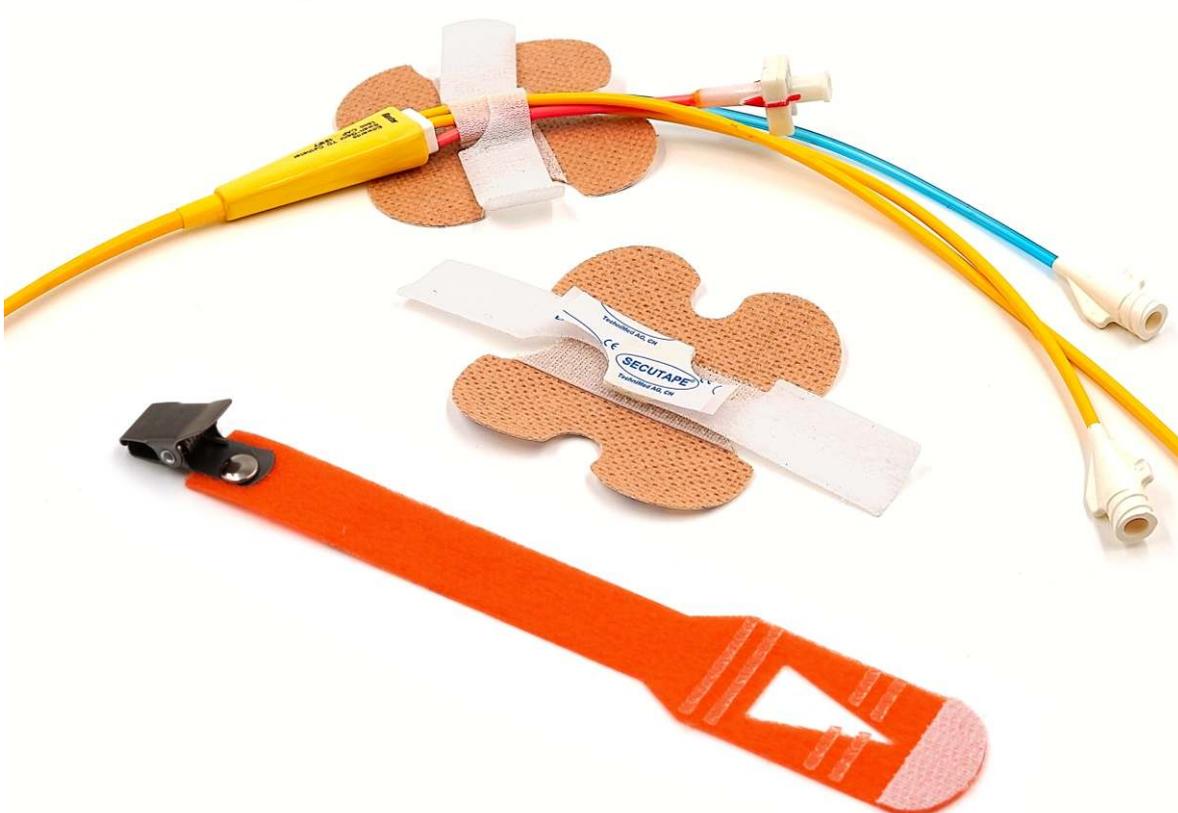



Zur Fixierung von "Schläuchen" und Leitungen speziell ZVK!!

UNIFIX eignet sich hervorragend zur sicheren Befestigung von dünneren Kathetern, Sonden und Leitungen, z.B. mehrlumige ZVK..

Die Basis ist ein sehr gut haltender, speziell ergonomisch geformter Halter aus hautschonendem, atmendem Vlies der auch hält wenn er nass wird, z. B.wenn der Patient gewaschen wird oder duscht.



Der Katheter wird in einem Klebstoffbett mit Klettverschluss sicher gehalten.



Zur Zugentlastung der z.T. langen Ableitungen empfehlen wir unser **KROKOFIX**, ein rutschfester flexibler Halter der an Kleidung und Bettwäsche befestigt werden kann.

Auf diese Weise werden Zug und Bewegungen am ZVK verringert, was Entzündungen verhindern hilft.

Krokofix klein Art. Nr. 8501410

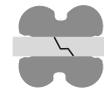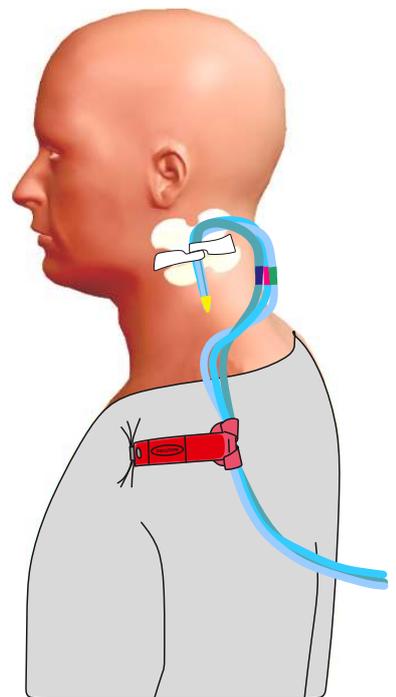

Unifix

Art. Nr. 8501500 1 VE 200 Stk.

8 Btl. à 25 Stk.

Einzelverp.

Halter 6 x 6 cm



Unifix Hydrocolloid

Art. Nr. 8501509 1 VE 200 Stk.

8 Btl. à 25 Stk.

Einzelverp.

Halter 6.5 x 5 cm



Es können mit UNIFIX auch kleinere Teile z.B. **Filter, Tansducer** o.ä. sicher am Körper befestigt werden.

Liegedauer nach Anwendung:
ca. 3- 6 Tage



Originalgrösse





Fixierset für grosse Lumina



Anwenden

Die ideale Fixierung für dicke "Schläuche".

Mit einer Basis aus einem hautschonenden und atmenden Vlies oder einem Hydrocolloid, in spezieller ergonomischer Form.


Der Halter hat eine spez. **Antirutschbeschichtung** die im Gegensatz zu Klebstoff **auch Siliconschläuche** sicher hält!

Die Fixierung hält sehr gut, selbst wenn sie nass wird, z.B. wenn der Patient duscht.

Die Fixierung ist besonders geeignet für Thoraxdrainagen, ECMO, Spülkatheter, Urinkath. u.ä..



	Art. Nr. 8501200 Hydrocolloid	1 VE 100 Stk. 4 Btl. à 25 Stk. Einzelverp.
		Halter 12 x 6.5 cm

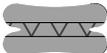
	Art. Nr. 8501201 Vlies	1 VE 100 Stk. 4 Btl. à 25 Stk. Einzelverp.
		Halter 12 x 6.5 cm

Liegedauer nach Anwendung:
bis ca. 4 Tage
Hydrocolloid ca. 6 Tage





Originalgrösse

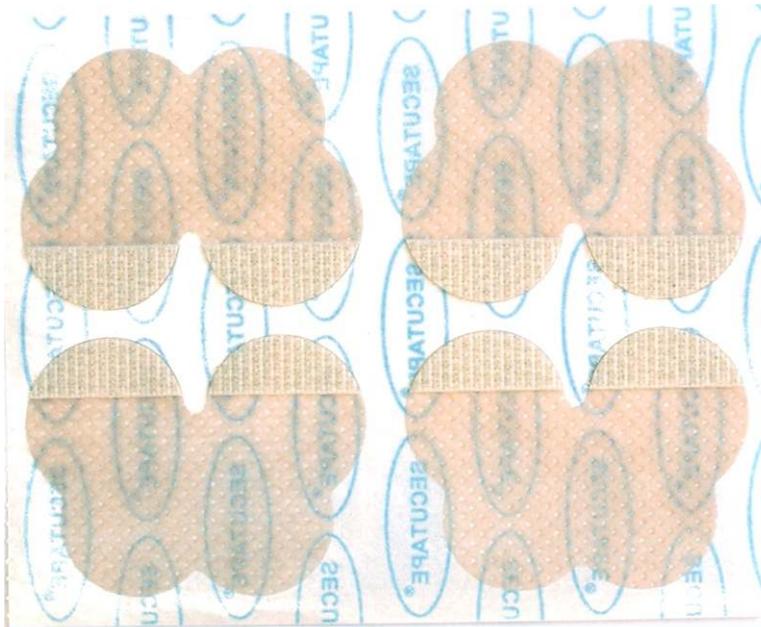

Patentierte Fixierung, zweiteilig für alle nasalen Sonden.

Ein spez. geformter **Fixierhalter** mit Klettverschluss, hergestellt aus einem hochwertigen, hautfreundlichen und atmenden Vlies.

Sowie einem **Haltebändchen** mit Klebefläche.

Der Halter bleibt auf der Nase, wenn nötig wird nur das Bändchen gewechselt.

Durch den Klettverschluss lässt sich die Sonde locker befestigen, es entstehen **keine Druckstellen in der Nase.**

So gibt es **keine Hautschäden** mehr durch ständiges abreißen der Pflasterstreifen.

Eine aufwändige **Hautpflege entfällt!**

Die Fixierung **hält auch wenn sie nass wird,** z.B.wenn der Patient gewaschen wird.




Art. Nr. 8500400
Hydrocolloid


1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Set

Halter 4.4 x 3.5 cm
Bändchen 7.5 x 0.8 cm




Art. Nr. 8500401
Vlies-Basis

1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Set

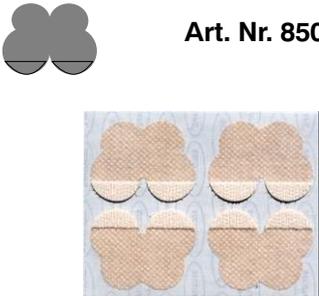

Art. Nr. 8500410

1 VE 400 Stk.
Verp. Kärtchen à 4 Stk.
Einzelverp.
Halter 4.4 x 3.5 cm

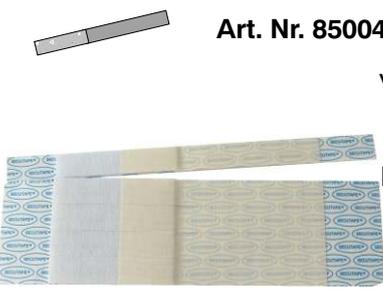

Art. Nr. 8500440

1 VE 500 Stk.
Verp. Kärtchen à 5 Stk.
Einzelverp.
Bändchen 7.5 x 0.8 cm

Liegedauer nach Anwendung:
ca. 2-3 Tage
Hydrocolloid - 5 Tage



Originalgrösse





Fixier-Set für Endotrachealtuben oral/nasal



Anwenden

Das Original SECUTAPE Tubus-Fixier-Set!
Seit über **30 Jahren** millionenfach bewährt.

Zwei Halter aus **sehr gut haftendem** und **hautschonendem** Vlies oder Hydrocolloid mit Klettverschluss.

Hypoallergene **nicht dehnende Nylonbänder** die **keine Feuchtigkeit aufnehmen**.

Die Bänder sind mittig mit einem med. Klebstoff beschichtet.

Der Klebstoff **greift Kunststoffe nicht an!**

Das gut haltendes System ermöglicht einfaches und **sicheres Absaugen**, es ist einfach in der Anwendung und durch lange Verweildauer **preiswert** im Gebrauch.

Das Fixierband Standard ist **einseitig flauschig**.

Das Softband ist **doppelseitig flauschig**, was Hautschäden verhindern hilft.



	Art. Nr. 8500609 Hydrocolloid	1 VE 100 Stk. 4 Btl. à 25 Stk. Einzelverp. Set
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

	Art. Nr. 8500600 Vlies	1 VE 200 Stk. 8 Btl. à 25 Stk. Einzelverp. Set
--	----------------------------------	---------------------------------------------------------

	Art. Nr. 8500700	1 VE 200 Stk. 8 Btl. à 25 Stk. Einzelverp. zwei Stk. Halter 6.5 x 5 cm
--	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

	Art. Nr. 8500709 Hydrocolloid	1 VE 200 Stk. 8 Btl. à 25 Stk. Einzelverp. Halter 6.5 x 5 cm
--	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

	Fixierband standard Art. Nr. 8500800	1 VE 200 Stk. 8 Btl. à 25 Stk. Einzelverp. Band Länge 40cm
--	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

	NEU Softband hautfarben Art. Nr. 8500805	1 VE 200 Stk. 8 Btl. à 25 Stk. Einzelverp. Band Länge 40cm
--	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3Tage
Hydrocolloid - 5 Tage

CE
Made in Germany
www.secutape.ch



Originalgrösse

Band 40 cm



CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Fixier-Set für Endotrachealtuben oral/nasal



Anwenden

Fixier-Set EXTRA für Endotrachealtuben

Unser bewährtes Fixier-Set mit neuem Band!

Ein neuentwickeltes, doppelseitig **flauschiges Nylonband**, hypoallergen und **mittig geschlitzt**.

Zwei Halter aus **sehr gut haftendem** und **hautschonendem** Vlies mit Klettverschluss.


Durch den Schlitz lässt sich das Band **besser und exakter positionieren!**

Das hochwertige Band nimmt **keine Feuchtigkeit** auf und **dehnt sich nicht**.

Am Tubus wird es mit einem high-tech Klettstreifen befestigt.

Beim Entfernen **bleibt kein Klebstoff am Tubus**.

Eine sichere Fixierung mit langer Verweildauer, **einfach in der Anwendung!**

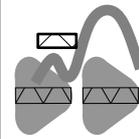

Fixier-Set EXTRA

für Endotrachealtuben

Art. Nr. 8500610 1 VE 200 Stk.


Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Beide Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

Band Länge 40cm



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3 Tage

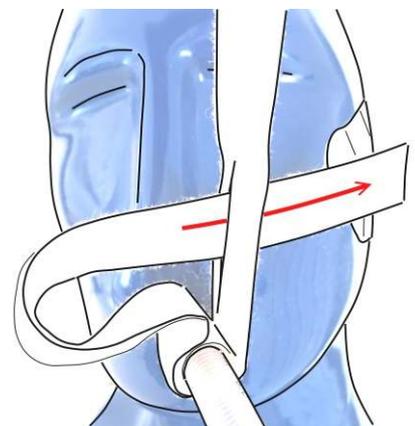

CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Länge 37 cm



SECUTAPE[®]
FIXIERUNG FIXATIONS FISSAGGIO

Kurzzeit-Fixierband selbstklebend
für Endotrachealtuben.
Short term fixation for endotracheal tubes
CE Made in Switzerland

open




SECUTAPE[®]
FIXIERUNG FIXATIONS FISSAGGIO

Anwendung

Haut reinigen.
Seitliche Abdeckung entfernen und Band auf eine Wange des Patienten kleben.
Mittlere Abdeckung entfernen und die schmale Stelle des Bandes zweimal an der Markierung um den Tubus kleben.
Restliche Abdeckung entfernen und Band straff auf die gegenüberliegende Wange des Patienten kleben.

Die Eignung einer SECUTAPE Fixierung für ein bestimmtes Hilfsmittel hängt im Einzelfall von vielen Faktoren ab die uns als Hersteller nicht bekannt sind. Die Auswahl und der richtige Einsatz der passenden Förmung liegt deshalb in der Verantwortung des Anwenders.

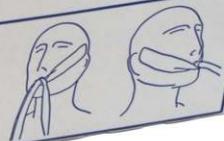

SECUTAPE[®]

SECUTAPE[®]

SECUTAPE[®]

SECUTAPE[®]

SECUTAPE[®]



Made in Switzerland
www.secutape.ch



Kurzzeit-Fixierband

selbstklebend
für Endotrachealtuben.



Anwenden

Fixierband für Endotrachealtuben zur Kurzzeitfixierung.

Speziell für den **Einsatz in der Anästhesie!**
Neu entwickeltes, hochwertiges, selbstklebendes
Fixierband.

Das **einfach anzuwendende** und hervorragend klebende
Tape-Band ist **reissfest und dehnt sich nicht.**

Hygienisch verpackt in einer Spenderschachtel,
ist es auf Grund seiner Form und des speziell gestanzten
Abdeckpapiers einfach im Handling.

Die Schachteln sind perforiert und können an der Front
geöffnet werden, was die Entnahme und die
Aufbewahrung erleichtert.



Kurzzeit-Fixierband

für Endotrachealtuben

Art. Nr. **8500820** 1 VE 400 Stk.
Schachteln a. 100 Stck.


Länge 37cm



**Das Band ersetzt nicht die
korrekte Langzeitfixierung.**



Made in Germany
www.secutape.ch

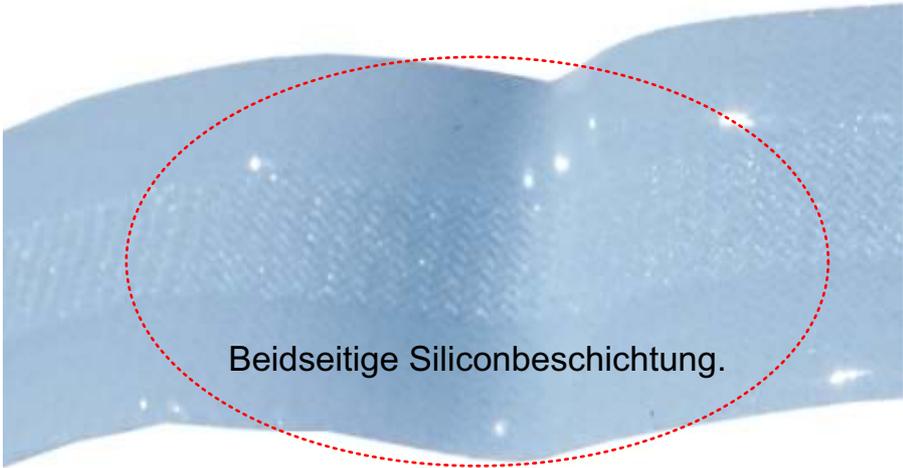

Beidseitige Siliconbeschichtung.



Tubus Band für Endotrachealtuben



Anwenden

SECUTAPE® Tubus-Band SILICON

Ein patentiertes, hypoallergenes, weiches Nylonband, das sich **nicht dehnt und keine Flüssigkeit aufnimmt**.

Durch die **Siliconbeschichtung** hat das Band **keine harten Kanten** und **verrutscht nicht auf der Haut**.

Es muss auf Grund seiner Eigenschaften **nicht straff gespannt werden**.

Das und die hydrophoben Eigenschaften des Bandes verhindern Hautschäden weitgehend .

Das Band wird am Tubus von einem selbstklebenden Klettstreifen zuverlässig gehalten. Der Klettstreifen lässt beim Ablösen keine Rückstände.

Es ist einfach in der Handhabung und muss wesentlich **weniger oft gewechselt werden** als herkömmliche Schaumstoffbänder.

Modernste Klettverschluss-technik für sicheren Halt.



Tubus-Band

Art. Nr. 8500850 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Länge 75 cm

**Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 1 - 2 Tage**



Made in Germany
www.secutape.ch



Länge 75 x 2cm





Universal-Band



Anwenden

Für Endotrachealtuben & Trachealkanülen.

Neu entwickeltes doppelseitiges Nylonband, hypoallergen und angenehm flauschig.

Das Band **dehnt sich nicht und** saugt sich nicht voll Flüssigkeit.

Auf Grund dieser Materialeigenschaften muss es wesentlich **weniger häufig gewechselt** werden als herkömmliche Schaumstoff- bzw. Textilbänder.

Es entstehen weniger Hautschäden durch Druck und Feuchtigkeit, da man es nicht wie üblich straff anlegen muss!

Vielseitig einsetzbare multifunktionale und sichere Fixierung, geringerer Verbrauch, einfach in der Handhabung.

Ein Produkt für beide Anwendungen,

sie können aber z.B. auch eine Leitung am Bein damit befestigen!



**Liegedauer nach Anwendung:
ca. 1 - 2 Tage**



Made in Germany

www.secutape.ch



Originalgrösse

Band 40 cm





Für Endotrachealtuben.

Neu entwickelte doppelseitige Nylonbänder,
Hypoallergen und angenehm flauschig.

Die Bänder dehnen sich nicht!

Das bewährte weiche **Fixierband** ist mittig mit einem med. Klebstoff beschichtet der um den Tubus gewickelt diesen sicher hält.

Das breitere dickflauschige **Halteband**, das um den Hals gelegt wird, ergibt in Verbindung mit dem Fixierband eine ausgesprochen sichere Tubusfixierung.

Die Fixierung kann bei Patienten mit Hautschäden problemlos eingesetzt werden.

Sehr gut haltende Fixierung, einfach in der Handhabung, auf Grund der Materialeigenschaften entstehen keine Druckstellen.



Soft-Set

Art. Nr. 8500900 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Zweiteilig



Das Halteband ist einzeln erhältlich.

**Liegedauer nach Anwendung:
ca. 1 - 3 Tage**



Tracheofix Comfort
53 x 3 cm
Absorber 20 x 4 cm





Tracheofix[®]
Comfort



Anwenden

Fixierband für Trachealkanülen D.B.G.M.

Vorteile durch neue Materialien!

Unser neu entwickeltes dickes, weiches Superflauschband aus Nylon, hydrophob und hypoallergen.


Das zweiteilige Band **dehnt sich nicht**, ist einfach anzulegen, variabel verstellbar und saugt sich **nicht voll Flüssigkeit**.

Da es nicht feucht wird ist es angenehm zu tragen.

Auf Grund seiner Materialeigenschaften muss es weniger häufig gewechselt werden als herkömmliche Schaumstoff- oder Textilbänder!

Das Band passt für die meisten Halsweiten, bei Überlänge einfach kürzen.

Weniger Verbrauch, weniger Arbeitsaufwand, weniger Müll.

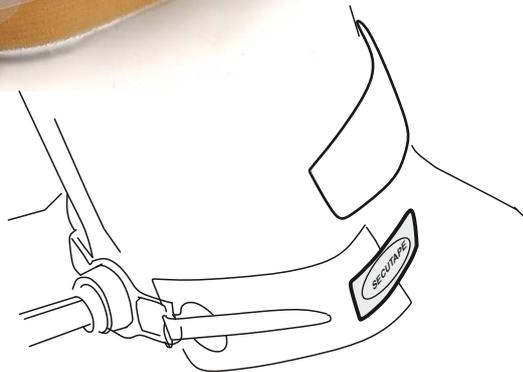


Tracheofix Comfort

Länge 50 x 3cm

Art. Nr. 8501750

Einzelverp. 4 Btl. à 25 Stk.

1 VE 100 Stk.

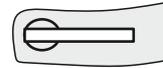


Superabsorber Pad

Länge 20 x 4cm

Art. Nr. 8501770

Einzelverp. 4 Btl. à 25 Stk.

1 VE 100 Stk.

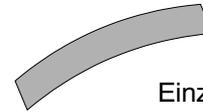

Weitere Informationen:

www.secutape-schulungen.ch

Liegedauer nach Anwendung:

ca. 3 Tage

mit Absorber Pad ca. 5 Tage.

Absorberpad für dieses Band.

Bei Hautschäden oder stark schwitzenden Patienten empfiehlt sich unser Pad aus **med. Superabsorber**.

Es ist selbstklebend und hält den Hals trocken.

Damit lassen sich Hautschäden verbessern bzw. zuverlässig vermeiden!

Ideal als Langzeitfixierung!

CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Originalgrösse



Bei Krokofix rutschen die Leitungen nicht durch!

Zur Fixierung von "Schläuchen" und Leitungen an Kleidung und Bettwäsche.

Krokofix ist eine manuelle **rutschhemmende Befestigung** für ^Schläuche^ aller Art.

Streifen aus Antirutschmaterial sorgen für sichere Fixierung!

Es wird einfach mit einer Edelstahlklammer an Kleidung oder Bettwäsche befestigt und ist mit üblichen Mittel zu desinfizieren.

Eingesetzt wird es speziell bei mobilen Patienten oder grosser Zugbelastung.

Krokofix gross wird hauptsächlich für Beatmungsschläuche eingesetzt.



Krokofix gross

Art. Nr. 8501420 1 VE 200 Stk.
8 Beutel zu 25 St.
23 cm







Krokofix klein

Art. Nr. 8501410 1 VE 200 Stk.
8 Beutel zu 25 St.
16.5cm



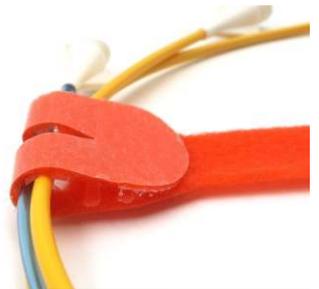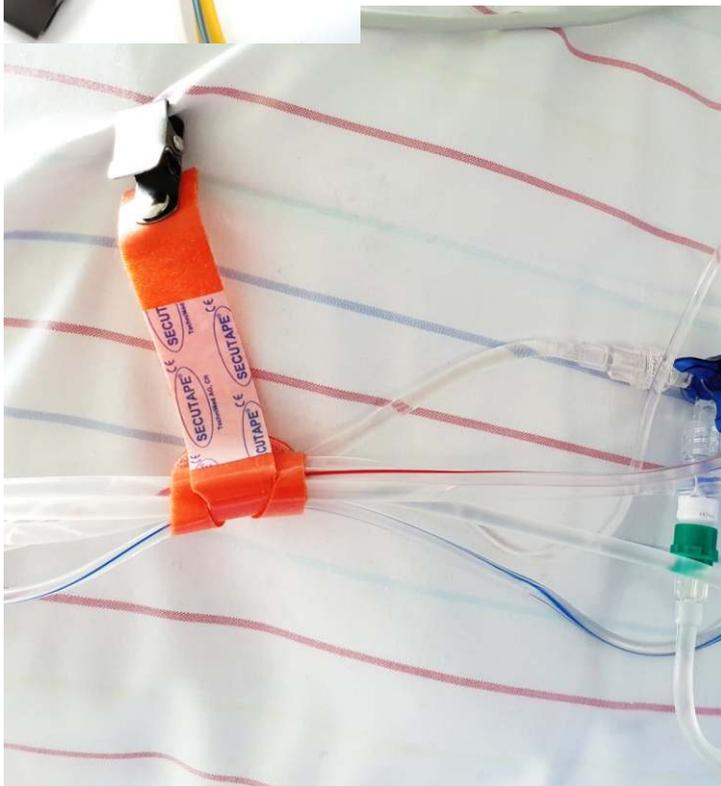



Kopfhalter-Set ECMO



Anwenden

Verstellbarer Kopfhalter zur Fixierung einer veno-arteriellen ECMO.

Der elastische Kopfhalter aus flauschigem Nylon ist auf jede Kopfgrösse einstellbar.

Er ist in Verbindung mit dem Fixierbändchen, und den Hydrocolloidhaltern eine sehr sichere Fixierung die dem Patienten ein gewisses Mass an Bewegungsfreiheit lässt.

Durch die zusätzliche Fixierung der Leitungen am Hals verringert sich die Belastung an der Austrittsstelle.

Die im Set enthaltenen Krokofix dienen zur Zugentlastung der weiteren Ableitung an der Bettwäsche.



Kopfhalter-Set:ECMO

Art. Nr. 8501610, VE 10 Set



Die Fixierhalter und Krokofix sind auch einzeln erhältlich.



CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Betrifft: Anwenderschulungen

Die neue MDR „Medical Device Regulation“ bringt Änderungen für uns alle.

Auch Medizinprodukte der Klasse 1 dürfen nicht mehr ohne Anwenderschulung eingesetzt werden.

So können wir **keine Produktmuster mehr ohne Einweisung** abgeben. Darüber hinaus haben wir uns praktisch zu vergewissern, dass unsere Produkte richtig angewandt bzw. eingesetzt werden.

Nach **MedBetreibV**, "Medizin Betreiber Verordnung" hat der Betreiber/Klinik dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter im Gebrauch der vorhandenen Medizinprodukte geschult sind. Dies gilt für alle nicht selbsterklärenden Produkte.

Deshalb haben wir ein qualifiziertes Team für laufende Anwendungsschulungen aufgebaut. **Diese Schulungen sind kostenlos** und können auch im laufenden Betrieb erfolgen.

Unser Mitarbeiter/in erklärt die Anwendung, weist auf Anwendungsfehler hin, gibt Hinweise und Tips. Über unsere Schulungsplattform sind auch Online-Schulungen möglich.

Der erfolgte Besuch/Schulung wird dokumentiert und Sie als Haus erhalten für Ihre Dokumentation eine entsprechende Mitteilung.

Von unserem Team ist auch danach immer jemand für Sie da und zu erreichen.

Diese Schulungen/Einweisungen sind sicher kein Nachteil, **durch den richtigen Einsatz der Produkte wird Zeit gespart, es sinkt der Verbrauch und es verbessert sich die Pflegequalität.**


Wir alle kommen damit auch den gesetzlichen Vorgaben nach.

TechniMed AG
Peter Piwonka
Direktor



**FIXIERUNG
FIXATION
FISSAGGIO**

lieber sicher SECUTAPE

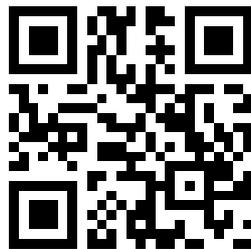

www.secutape.ch