

Anwendungshinweise


Tracheofix Comfort

Fixierband für Trachealkanülen




1 - Den Klettstreifen (kurzes Band) durch die Kanüle führen, auf dem Band befestigen.

2 - Den Klettstreifen (langes Band) durch die andere Seite der Kanüle führen und auf dem Band befestigen.

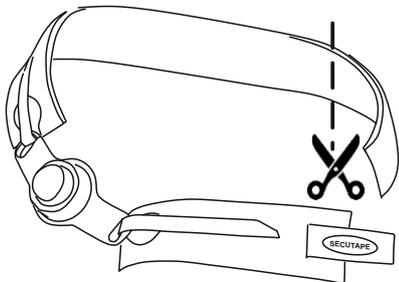

3 - Das länger Band um den Hals des Patienten führen.

- Die Länge auf den Patienten anpassen, gegebenenfalls die Überlänge abschneiden.

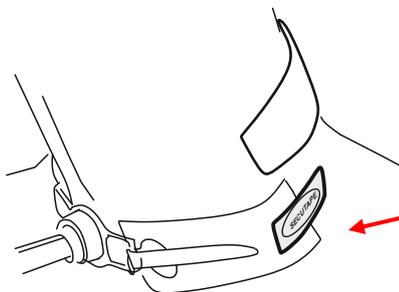

4 - Mit dem SECUTAPE Klettbändchen schliessen.
- Nicht straff spannen, das Band dehnt sich nicht.

- Dickes, weiches Superflauschband aus Nylon, hydrophob und hypoallergen.
- Das zweiteilige Band dehnt sich nicht und saugt sich nicht voll Flüssigkeit.
- Das Band kann einige Tage am Patient verbleiben.

Tracheofix Comfort



Tracheofix Comfort
Art. Nr.
8501750



Liegedauer je nach Anwendung bis 3 Tage


Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt.



Anwendungshinweise


Tracheofix

Superabsorber Pad

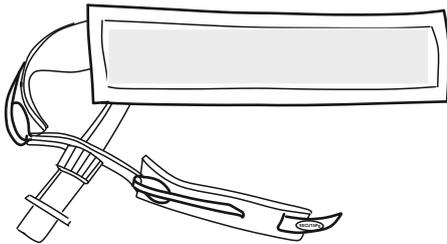

- 1 - Das Papier vom Pad entfernen und im längeren Band (weisse Seite) mittig aufkleben

Das Absorber-Pad dient als zusätzliche Sicherung vor Hautschäden.

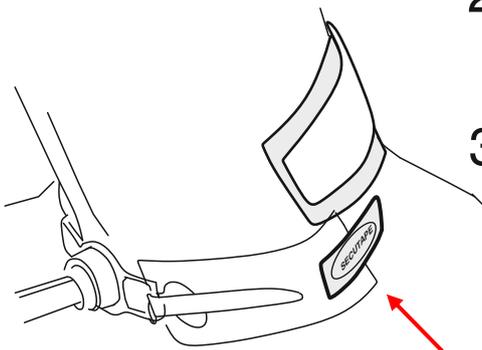

- 2 - Beide Bandteile an der Kanüle befestigen
- Die weisse Seite zum Hals
- 3 - Das Band unter den Hals des Patienten führen
- Die Länge auf den Patienten anpassen gegebenenfalls die Überlänge abschneiden
- 4 - mit dem SECUTAPE Plättchen verschliessen
- Nicht straff spannen, das Band dehnt sich nicht

Medizinischer Superabsorber.
Hält den Hals trocken und dient als zusätzliche Polsterung und Sicherheit gegen Hautschäden.

Tracheofix
Superabsorber
Art. Nr. 8501770



Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt.