



Anwendungshinweise

Fixierband für Endotrachealtuben zur Kurzzeitfixierung

Den Karton seitlich an der Markierung aufbrechen und die Bänder einzeln entnehmen.



1

- Haut trocken und fettfrei vorbereiten.
- Seitliche Abdeckung entfernen.
- Das Band auf eine Wange des Patienten kleben.



2

- Mittlere Abdeckung entfernen.
- Die schmale Stelle des Bandes zweimal an der Markierung um den Tubus kleben.



3

- Restliche Abdeckung entfernen.
- Das Band straff auf die gegenüberliegende Wange des Patienten kleben.

- Hochwertiges, selbstklebendes Fixierband spez. für den Einsatz in der Anästhesie.
- Das hervorragend klebende Tape-Band ist reissfest und dehnt sich nicht.

Kurzzeit Fixierband für Endotrachealtuben

Schachtel à 100 Stk.
VE 400 Stk.
Art. Nr.
8500820



Bei Pergamenthaut bzw. vorgeschädigter Haut nicht einsetzen.
Nach Gebrauch **langsam ablösen!**

Das Band ersetzt nicht die korrekte Langzeitfixierung (Wie z.B. das Fixier-Set Art.Nr. 8500600)



Liegedauer je nach Anwendung bis 24 Std.

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.