




Anwendungshinweise

Seit 30 Jahren
millionenfach
bewährt.

Fixier-Set für Endotrachealtuben

Hypoallergene nicht dehnende Nylonbänder.
(Bei leichter Verschmutzung einfach abwischen.)

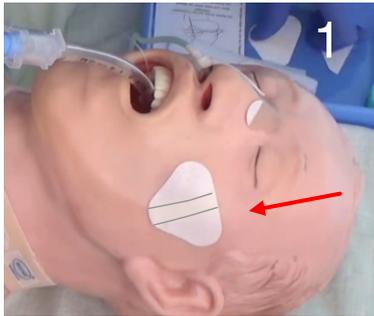

- Haut trocken und fettfrei vorbereiten.
- Folie vom Halter abziehen.
- Im **oberen Bereich** der Wangenknochen die Halteplatte vertikal modellieren.



- Die Abdeckung vom Band lösen.
- Mittig mit der Klebefläche **zweimal** um den trockenen und fettfreien Tubus legen und festziehen.




- Das Band auf der Klettplatte an einer beliebigen Stelle fixieren.
- Damit keine Kante auf der Haut liegt das Band drehen, so liegt der Flausch komplett auf der Haut.
- **Das Drehen ist beim Softband nicht erforderlich.**

- Hautschonende Fixierhalter mit spezieller Klettechnik
- Bei Patienten mit Hautproblemen und oder bei hoher Zugbelastung Halter aus Hydrocolloid einsetzen.
- Die Fixierung hält auch wenn sie nass wird.

Fixier - Set für Endotrachealtuben

Fixier-Set Vlies-Basis
Art. Nr. 8500600

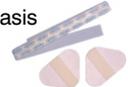

Fixier-Set Hydrocolloid
Art. Nr. 8500609



Softband zu Set
Art. Nr. 8500805



Fixier Band zu Set
Art. Nr. 8500800



Fixierhalter zu Set
Art. Nr. 8500700



Fixierhalter zu Set
Art. Nr. 8500709



Hydrocolloid



Absaugen und Mundpflege:

Beide Enden auf einer Seite befestigen, so bleibt der Tubus fixiert und gesichert!



Liegedauer je nach Anwendung bis 3 Tage

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.