





# Anwendungshinweise

## Fixier-Set für Endotrachealtuben

Zwei Anwendungsvarianten

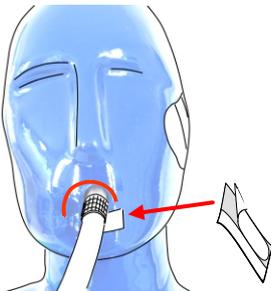


- Haut trocken und fettfrei vorbereiten.
- Folie vom Halter abziehen und im oberen Bereich der Wangenknochen die Wangenhalter vertikal modellieren.
- Klettbandchen an der Markierung um den gereinigten Tubus kleben.

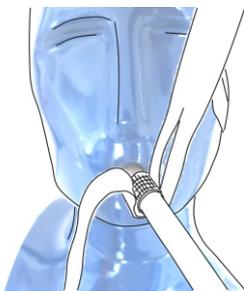

Variante 1

- Das Band mittig von unten am Klettbandchen befestigen einmal um den Tubus legen.
- Die Enden an den Wangenhalter befestigen.
- Das Band und die Wangenhalter bilden ein Kreuz.

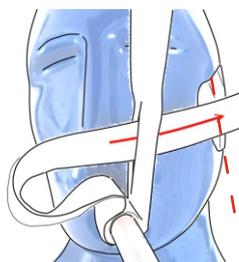

Variante 2

- Wie oben, nur das Band durch den Schlitz im Band ziehen und die Enden an den Wangenhaltern befestigen.
- Das Band und die Wangenhalter bilden ein Kreuz.

**Wichtig:** das Klettplättchen am Tubus muss ganz bedeckt sein sonst besteht die Gefahr von Hautschäden.

- Hypoallergenes doppelseitiges Nylonband.
- Dehnt sich nicht und saugt sich nicht voll.
- Hautschonende Fixierhalter.
- Die Fixierung hält auch wenn sie nass wird.
- Bei Patienten mit Hautproblemen und oder bei hoher Zugbelastung Halter aus Hydrocolloid Art. 8500709 einsetzen.

## Fixier - Set EXTRA

### Fixier-Set EXTRA

Art. Nr. 8500610

### Fixierband EXTRA

Art. Nr. 8500810



Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

### Variante 1



### Variante 2



Liegedauer je nach Anwendung bis 4 Tage

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.