
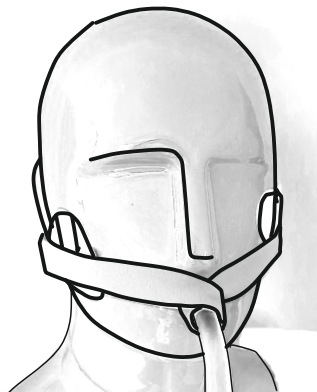
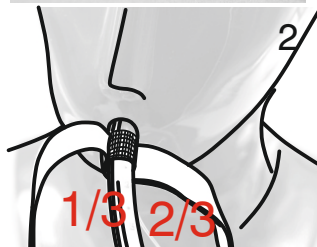


Anwendungshinweise

Universal-Band

Fixierband für alle Zu- und Ableitungen.
spez. für Endotrachealtuben & Trachealkanülen


Endotrachealtuben zirkulär

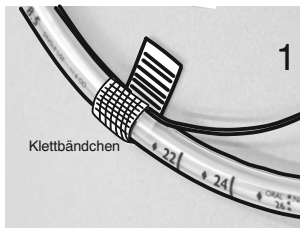

Benötigtes Material:

Band, Klettbandchen, Secutape Plättchen


- Abdeckfolie abziehen,
 - Klettbandchen an der Markierung überlappend um den gereinigten, trockenen Tubus kleben.
 - Nicht kürzen!
 - Mit 1/3, 2/3 des Bandes an der Klettfläche einmal um den Tubus wickeln.
 - Um den Hals führen, Überlänge abschneiden.
- 3 - Mit dem SECUTAPE Plättchen schliessen

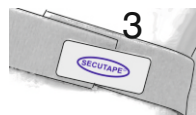

Für sehr unruhige Patienten!

In Verbindung mit zwei Fixierhaltern Art. 8500700 ergibt das Universalband eine sehr sichere feste Fixierung.

Trachealkanülen

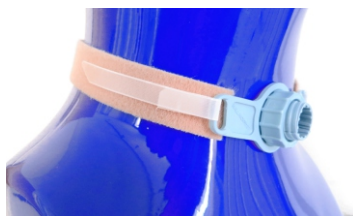


- Nicht zu straff spannen das Band dehnt sich nicht.

Benötigtes Material: Band, 2 Klettstreifen

- Einen Klettstreifen am Band befestigen durch die Öse der Trachealkanüle führen und auf dem Band fixieren.
- Das Band um den Hals führen.
- Anpassen und Überlänge abschneiden.
- Den zweiten Klettstreifen am Band befestigen durch die zweite Öse führen, am Band befestigen. Überlänge abschneiden.

Universal-Band für Endotrachealtuben und Trachealkanülen


Universal-Band
Art. Nr.
8500890

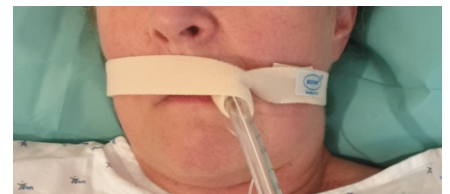

Leitungen

Befestigung an Armen/Beinen

- Klettstreifen am Band befestigen, Leitung einlegen Streifen schliessen
- Das Band um das Bein/Arm legen und mit dem SECUTAPE Plättchen befestigen

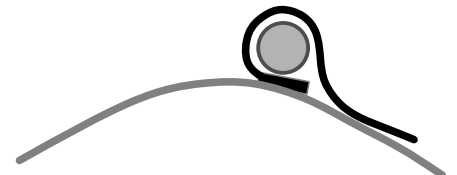

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.