



# Anwendungshinweise

## Kopfhalter - Set ECMO

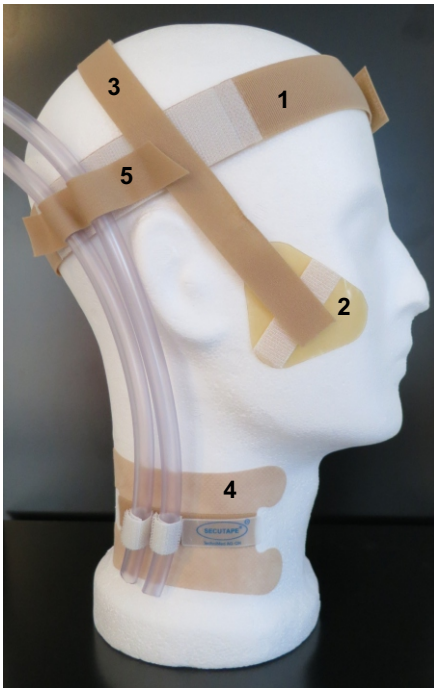

- 1 - Elasticband um den Kopf legen.  
- Die beiden Klettflächen liegen über den Ohren, - an der Stirn schliessen
- 2 - Fixierhalter rechts und links anbringen.  
(Haut nicht mit Benzin reinigen)  
- Grosses Halteband über den Kopf legen und auf beiden Seiten am Klett und Fixierhalter befestigen.
- 3 - **Wenn benötigt!** Fixierhalter Unifix 2 auf der trockenen fettfreien Haut anmodellieren.  
- Die 2 Klettplättchen an die Schläuche kleben  
- Am Fixierhalter befestigen.
- 4 - Mit dem kleinen Nylonband die Leitung bzw. die Leitungen befestigen. *siehe Bild*
- 5 - Die Zu bzw. Ableitungen mit Krokofix an der Bettwäsche befestigen.

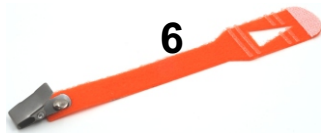

Für **Leitungen am Bein** nutzen Sie bitte unsere Fixierung für große Lumina, sie ist in Vlies oder Hydrocolloid erhältlich. Art. 8501200 Hydrocoll., Art. Nr. 8501201 Vliesbasis.

- Verstellbarer Kopfhalter zum fixieren einer veno-arteriellen ECMO mit
- hypoallergenem Nylon Band
- Für jede Kopfgrösse einstellbar.

## Kopfhalter-Set ECMO



Kopfhalter-Set ECMO

Art. Nr. 8501610



Das Kopfhalterset ist variabel und anpassbar an alle Gegebenheiten. Teile die Sie aus dem Set nicht benötigen können beim gleichen Patienten als zusätzliche Fixierung eingesetzt werden. Bitte werfen Sie nichts weg !