





# Anwendungshinweise

## Fixier-Set für grosse Lumina

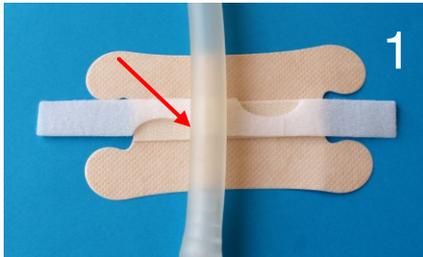


- Haut trocken und fettfrei vorbereiten.
- Folie von der Rückseite abziehen..
- Fixierung auf die geeignete Hautstelle kleben.
- Schutzpapier entfernen
- Schlauch einlegen

**Achtung:** bei **Hydrocolloid** Rückseitenfolie langsam entfernen, Hydrocoll.verformt sich sonst.

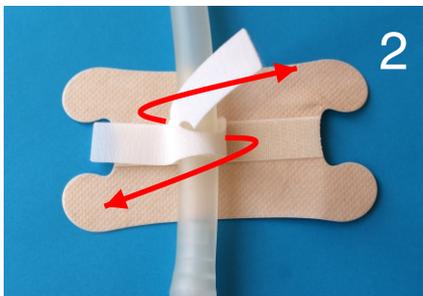

- Beide Enden über den Schlauch legen s. Bild.
- Lasche schliessen

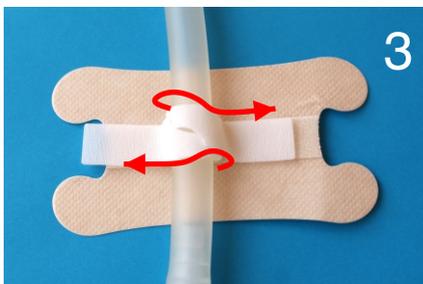

- Lasche leicht andrücken.
- Klett nicht komplett bedecken ( lässt sich besser entfernen )
- Kann mehrfach geöffnet und verschlossen werden.

- Der Patient kann gewaschen bzw. geduscht werden, die Fixierung hält auch wenn sie nass wird.
- **Bei Hydrocolloid**, nicht mit Benzin reinigen, die Fixierung gut anformen!

## Fixier-Set für grosse Lumina

Fixier Set für grosse Lumina

Art. Nr. 8501201




Vlies-Basis

Fixier Set für grosse Lumina

Art. Nr. 8501200



Hydrocolloid

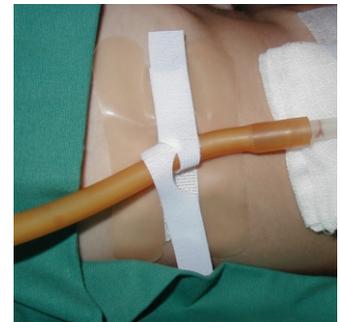

Liegedauer je nach Anwendung bis 4 Tage, Hydrocoll.- 6 Tage.

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.